



# Dolphin Medical



## **CURETA DE SUCCIÓN ENDOMETRIAL DOLPHIN**

La **CURETA DE SUCCIÓN ENDOMETRIAL DOLPHIN** esterilizada en óxido de etileno se utiliza para obtener una muestra de la mucosa uterina.

La **CURETA DE SUCCIÓN ENDOMETRIAL DOLPHIN** es una cánula de succión de 3 o 3,6mm (diámetro externo) esterilizada, a menos que el envoltorio esté abierto o dañado. **LA CURETA DE SUCCIÓN ENDOMETRIAL DOLPHIN** ha sido diseñada para ser utilizada una sola vez.

### **INSTRUCCIONES**

Una cánula de succión endometrial, como la **LA CURETA DE SUCCIÓN ENDOMETRIAL DOLPHIN** es un dispositivo empleado para extraer muestras de materia del útero y de la mucosa uterina mediante el raspado o la succión al vacío. Estos dispositivos obtienen muestras hísticas para biopsias de detección temprana del cáncer o pueden utilizarse para extracciones menstruales.

### **PRECAUCIONES**

No reutilizar para evitar que la usuaria pueda infectarse con algún tipo de microorganismo.

## **CURETA DE SUCCIÓN ENDOMETRIAL DOLPHIN**

*Distribuido por:*



Dolphin Medical

Callao 2970 Of. 806  
Las Condes - Santiago - Chile  
Fono: (56 2) 29520165  
Fax: (56 2) 2249 7354  
E-mail: [ventas@dolphinmedical.com](mailto:ventas@dolphinmedical.com)

[www.dolphinmedical.com](http://www.dolphinmedical.com)

## **CURETA DE SUCCIÓN ENDOMETRIAL DOLPHIN**

**Código: DME000014 - Estándar 3.0**

### **CONTRAINDICACIONES**

El procedimiento está contraindicado en casos de sospecha de embarazo o en mujeres con infecciones pélvicas agudas.

También está contraindicado para mujeres con infecciones crónicas del cuello uterino o para cualquier condición que desaconseje un procedimiento quirúrgico.

### **PROCEDIMIENTOS**

Al sondear el útero utilizando este dispositivo, se debe tener precaución de la pared uterina. Asegúrese de no desplazar el pistón de la **CURETA DE SUCCIÓN ENDOMETRIAL DOLPHIN** cuando se encuentre dentro del útero.

### **INSTRUCCIONES DE USO**

1. Preparar la vagina y el cuello uterino para iniciar un procedimiento intrauterino estéril.
2. Exponer el cuello uterino con el uso de un espéculo adecuado.



0434



3. Introducir suavemente una sonda uterina para determinar la profundidad y la dirección de la cavidad uterina. Puede ser necesario sujetar el cuello del útero con un tenáculo.

Si el útero está en retroversión se debe sujetar al labio posterior del cuello uterino.

Aplicar una tracción suave para estirar cualquier posible curvatura del cuello uterino.

4. Una vez determinada la profundidad del cuello uterino, insertar la **CURETA DE SUCCIÓN ENDOMETRIAL DOLPHIN** prestando mucha atención a la escala en el relieve de la funda de la **CURETA DE SUCCIÓN ENDOMETRIAL DOLPHIN**. Esta escala proporciona precaución adicional contra posibles perforaciones.

5. Con el pistón totalmente presionado, insertar la **CURETA DE SUCCIÓN ENDOMETRIAL DOLPHIN** e introducir suavemente a través del cuello uterino cualquier tracción aplicada con el tenáculo.

6. Con una mano sostener el extremo proximal de la "paleta" del pistón, retirar rápidamente el pistón tirando de la "paleta" para crear un vacío o succión con la **CURETA DE SUCCIÓN ENDOMETRIAL DOLPHIN**. El movimiento de retiro debe ser suave pero rápido y constante, hasta que el pistón llegue al tope integrado a la **CURETA DE SUCCIÓN ENDOMETRIAL DOLPHIN**. Dejar el pistón en posición totalmente retraída.

7. Una vez que el pistón se ha contraído, inmediatamente girar (dar vueltas o rodar) la **CURETA DE SUCCIÓN ENDOMETRIAL DOLPHIN** con los dedos mientras se avanza y retrocede, al mismo tiempo debe moverse de lado a lado dentro de la cavidad uterina. Realizar este movimiento de barrido durante al menos tres o cuatro veces para obtener una muestra adecuada.

8. La **CURETA DE SUCCIÓN ENDOMETRIAL DOLPHIN** debe retirarse del útero con suavidad. Al examinar el dispositivo, debe observarse una pieza o muestra de la mucosa uterina. Por lo general, el sangrado resulta mínimo o no se produce.

9. Cortar la punta de la **CURETA DE SUCCIÓN ENDOMETRIAL DOLPHIN** justo por encima del punto de muestreo del dispositivo. El punto de muestreo es un pequeño agujero en el extremo distal de la **CURETA DE SUCCIÓN ENDOMETRIAL DOLPHIN**.

10. A continuación, presionar el pistón dentro de la funda y la muestra se expulsa fácilmente a un vial de transferencia apropiado.

### **ADVERTENCIAS**

1. Por lo general, las pacientes con estenosis del cuello uterino requieren de precauciones extremas. No emplear fuerza al utilizar el dispositivo en pacientes con estenosis, es posible aplicar un anestésico tópico antes de utilizar la **CURETA DE SUCCIÓN ENDOMETRIAL DOLPHIN**.

2. Poner especial atención y observar las posibles reacciones adversas que puedan producirse ocasionalmente en cualquier procedimiento intrauterino.

### **REACCIONES ADVERSAS**

1. Observar si las pacientes dan muestras de palidez inusual, náuseas, vértigos o debilidad. Cualquier manipulación del cuello uterino puede provocar una reacción vaso-vaginal. Estos síntomas suelen desaparecer después de unos 15 minutos de reposo o de la administración de un analgésico suave.

2. En algunos casos después del procedimiento, puede producirse hemorragias puntuales o calambres leves. Debe indicarse a la paciente que avise al médico si continúa el sangrado o si la fiebre no desaparece.



0434

