

THE SMART CONTRACEPTION


MEDintim
personal healthcare

libre de
nonoxinol-9



Caya[®] diaphragm gel

Gel anticonceptivo para su uso con diafragmas y capuchones cervicales de silicona

Indicación

Caya[®] Gel es un gel anticonceptivo para su uso con anticonceptivos de barrera como el diafragma y el capuchón cervical de silicona. **Caya[®] Gel** aumenta la seguridad de estos métodos anticonceptivos. El uso sin gel anticonceptivo es demostrablemente menos seguro.

Modo de acción

Caya[®] Gel crea, gracias a la celulosa (gelificado), una barrera física adicional delante del cuello uterino, y reduce el valor pH del flujo vaginal. El elevado grado de acidez y la viscosidad del gel tienen un efecto inhibitorio sobre la movilidad de los espermatozoides.

Aplicación

Antes de introducir el diafragma en la vagina aplicar aproximadamente una cucharadita (aprox. 4 ml) de **Caya[®] Gel** en la membrana o en el capuchón cervical. Se deben tener en cuenta las instrucciones de uso correspondientes. El aplicador vaginal se utiliza de forma opcional si se quiere aplicar más gel delante del diafragma (p. ej. **Caya[®] contoured diaphragm**), antes de tener nuevamente relaciones sexuales. El aplicador vaginal es reutilizable, pero se debe lavar con agua caliente y jabón después de cada uso.

Contraindicaciones

No hay información acerca de incompatibilidades. En caso de observar efectos secundarios interrumpa inmediatamente el uso de **Caya[®] Gel** y consulte a su ginecólogo(a) o matron(a)

Observación

Caya[®] Gel:
- NO protege contra el contagio de enfermedades de transmisión sexual.
- NO es un método anticonceptivo seguro si se usa solo, sin un anticonceptivo de barrera.
- es soluble en agua y compatible con preservativos de caucho natural y de poliuretano.

Caya[®] Gel es idéntico en su fórmula al **ContraCep[®] verde** que fue fabricado entre 1972 y 2002, cuyo nuevo nombre es **Contragel[®] Green** y que está disponible en el mercado desde el año 2005 bajo ese nombre. En un estudio comparativo de 1989 (Dittrich 1989) con diferentes geles y cremas para diafragmas, esta composición con base de ácido láctico fue valorada como igualmente segura a los productos que contienen nonoxinol-9, pero con un potencial de efectos secundarios notablemente menor.


Ingredientes

Agua, ácido láctico, lactato sódico, celulosa, ácido sórbico, vainillina

Contenido:

60 g de gel con aplicador vaginal

Almacenamiento

Guardar en un lugar fresco y seco. 4°C  25°C
Mantener el tubo siempre cerrado.
Una vez abierto el producto utilizarlo en un plazo de 3 meses.

Disponible en su distribuidor.

EAN 4013273001250

 DeltaMed GmbH
Raiffeisenstr. 8a
61169 Friedberg
Deutschland

 0124

Producto sanitario
Made in Germany

Distribuidor en Chile:
Dolphin Medical
Callao #2970 Of. 806
Las Condes, Santiago
Chile

Para mayor información:
ventas@dolphinmedical.com
Tel. +56 2 2952 0165
www.dolphinmedical.com


Dolphin Medical

www.caya.eu