

ARABIN®

PESARIO DE CERCLAJE

PERFORADO

Pesario de Cerclaje ARABIN® "Tipo ASQ Perforado"

Indicación:


Para apoyar el cuello uterino en pacientes embarazadas, ya sea con quejas de prolapso (dolorosa "presión a la baja" al estar de pie y caminar) y mujeres embarazadas expuesta a esfuerzos físicos (por ejemplo; de pie un largo tiempo) y/o en pacientes con trabajo de parto prematuro amenazante (canalizando longitud cervical/corto).

Perforación permite el drenaje de descarga.


Medidas y Modelos

Los Pesarios de Cerclaje se clasifican de acuerdo a:

- El diámetro inferior más grande (65 o 70 mm)
- La altura (17, 21, 25, 30 mm)
- El diámetro superior pequeño (32 o 35 mm)

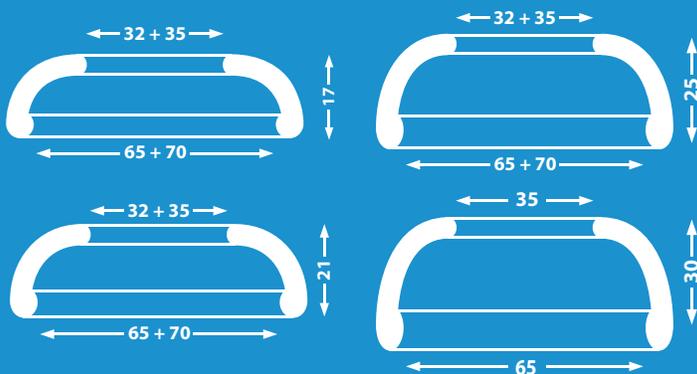

Fabricado con **SILPURAN 20/50** de **Wacher Chemicals**, nueva línea de **Silicona Ultra-pura Transparente**, para aplicaciones **de uso médico** y con excelente respuesta de **biocompatibilidad**.

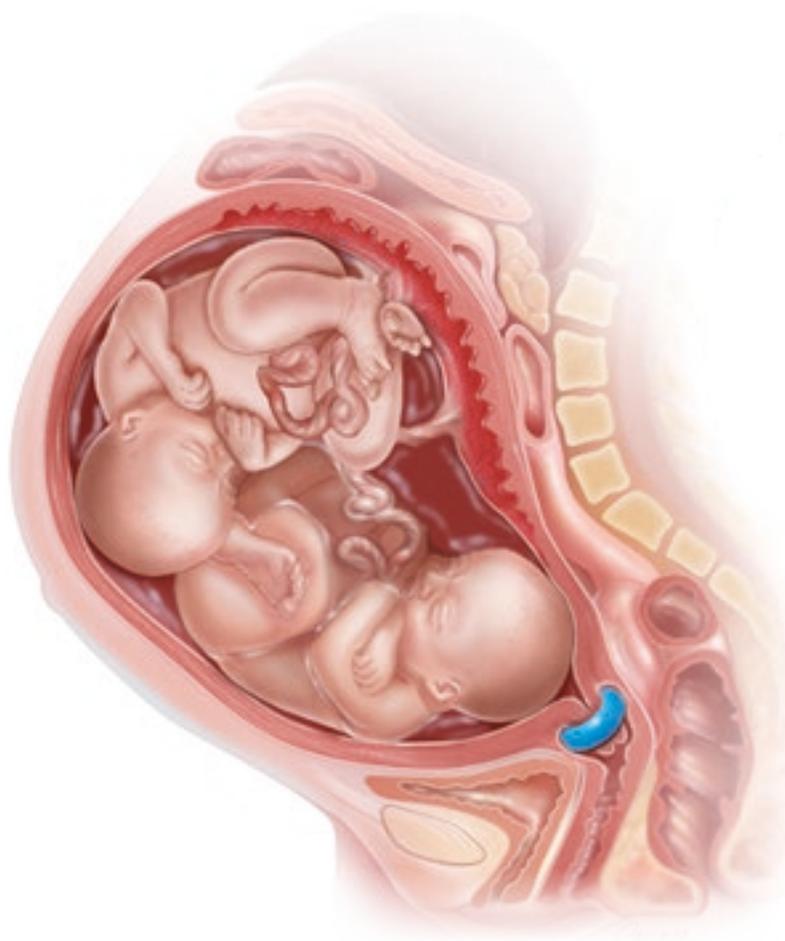

Cuando se introduce el pesario, la curva del pesario debe apuntar hacia arriba, de modo que se pueda ver la curva del orificio más pequeño del pesario. Tal como se indica en la siguiente ilustración.






PERFORADO

Los valores normales (sonografía transvaginal) de la longitud cervical y el orificio cervical interno en la posición de decúbito o vertical.


Embarazo Simple

Embarazo Múltiple

Largo Cervical en milímetros

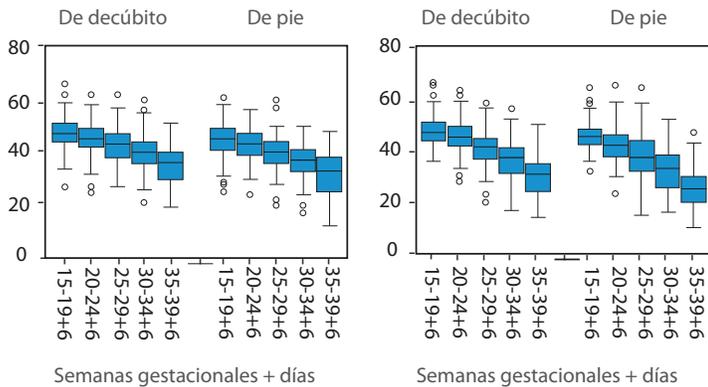


Orificio Cervical Interno (canal cervical) en milímetros

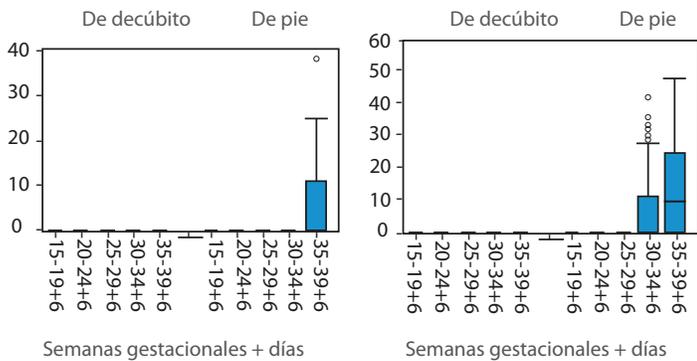

Las columnas azules representan la distribución de los valores normales entre los percentiles 25 y 75. Puede haber una indicación para colocar un pesario de cerclaje en los casos donde los valores de la longitud cervical son (muy) por debajo del percentil 25 o valores de la anchura del orificio interno son por encima del percentil 75 (principalmente antes de las 32 semanas).

Composición de la medida

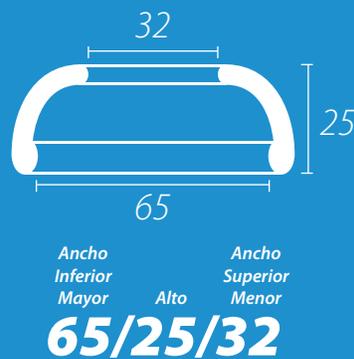

Códigos	Medida
DM65/17/32	65/17/32
DM65/17/35	65/17/35
DM65/21/32	65/21/32
DM65/21/35	65/21/35
DM65/25/32	65/25/32
DM65/25/35	65/25/35
DM65/30/35	65/30/35
DM70/17/32	70/17/32
DM70/17/35	70/17/35
DM70/21/32	70/21/32
DM70/21/35	70/21/35
DM70/25/32	70/25/32
DM70/25/35	70/25/35

BOLIVIA

Clotilde Velasco 4760
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

(591-3) 342 2120

ventasdbm@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com

CHILE

Callao 2970 Of. 806
Las Condes - Santiago - Chile

(56 2) 2952 0165

ventas@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com

COLOMBIA

Cra 67 No 167-61 Of 607
Bogotá - Colombia

(57 1) 31 3412 3620

ventasdmc@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com

PERÚ

Arica 655 Int 404
Distrito Miraflores - Lima - Perú

(51) 9 4027 5805

ventasdmp@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com



Dolphin Medical