



este producto no fue  
hecho con látex de  
caucho natural



# ABISSAL® HOOK

## PERFORADOR AMNIÓTICO

### EMBARAZO Y PARTO

## Perforador amniótico

Para la rotura intencionada de membranas durante el trabajo de parto. Está provista de un gancho que permite la laceración de la membrana no traumática aguda. Su forma anatómica y ergonómica permite un uso seguro y cómodo

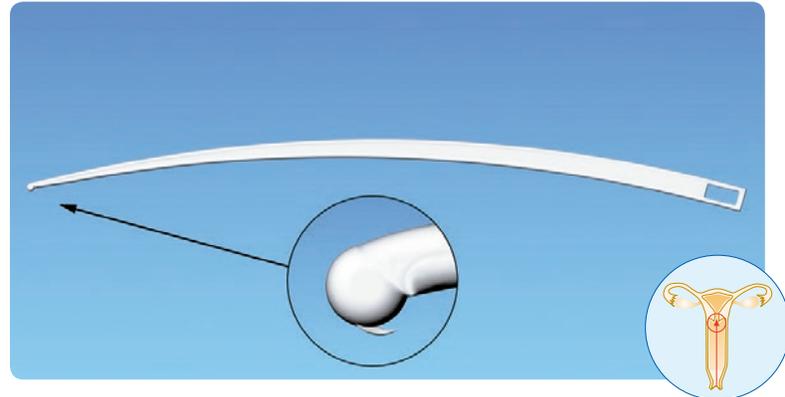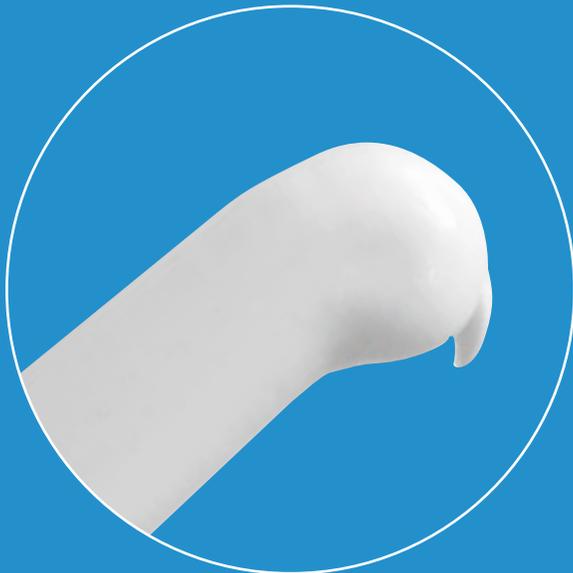

### Instrucciones para el uso

Introducir los dedos en la vagina hasta tocar el saco. Deslizar el perforador sobre los dedos hasta alcanzar el saco amniótico. Ejercer una ligera presión y arrastrar hasta que la membrana se lacere. Retirar el perforador, deslizándolo siempre sobre los dedos.

**Advertencias:** Leer las instrucciones antes del uso. No reutilizar – utilizar sólo si el envase se encuentra íntegro. Utilizar inmediatamente después de la apertura del envase. Eliminar después de su uso en conformidad con la legislación vigente. El dispositivo tiene que ser utilizado exclusivamente por personal médico especializado.

Se suministra en una sola bolsa, producto de un solo uso, esterilizado con ETO y marca CE.

Código	Descripción Producto	Presentación
DM0602001	ABISSAL® HOOK Perforador Amniótico	100Pcs/Caja

#### BOLIVIA

Clotilde Velasco 4760  
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

(591-3) 342 2120

ventasdmb@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com

#### CHILE

Callao 2970 Of. 806  
Las Condes - Santiago - Chile

(56 2) 2952 0165

ventas@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com

#### COLOMBIA

Cra 67 No 167-61 Of 607  
Bogotá - Colombia

(57 1) 31 3412 3620

ventasdmc@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com

#### PERÚ

Arica 655 Int 404  
Distrito Miraflores - Lima - Perú

(51) 9 4027 5805

ventasdmp@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com



Dolphin Medical

BGININ-28092020-REV-001