



Dolphin Medical

PESARIOS

PROLAPSO, INCONTINENCIA Y DIAGNÓSTICO

www.dolphinmedical.com



Al colocar un pesario, el médico debe realizar un examen pélvico normal antes de la introducción y ajuste. El examen pélvico puede ayudar a determinar el tamaño adecuado de un pesario. El **El Set de medidas para pruebas de los Pesarios Dolphin Medical (Fitting Set)** también puede ser una herramienta útil para ajustar la mayoría de los pesarios.


Todos nuestros pesarios se pliegan o comprimen para facilitar la inserción y extracción. Las instrucciones de ajuste para cada estilo de pesario se incluyen en el paquete del pesario. Se debe instruir a los pacientes sobre la inserción y extracción del pesario, así como sobre los procedimientos de limpieza que se describen en el Instructivo. Se debe instruir a los pacientes para que informen acerca de cualquier incomodidad inmediatamente y se debe programar una visita de seguimiento regular.

Un pesario apropiado debe ser lo suficientemente grande para realizar su función diseñada, pero no causar ninguna presión indebida o incomodidad. El médico debe poder insertar un dedo entre el borde exterior de un pesario correctamente ajustado y la pared vaginal.

Todos los pesarios están contraindicados en pacientes que tienen infecciones agudas del tracto genital, las infecciones pélvicas no son compatibles

BOLIVIA


 Clotilde Velasco 4760
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

 (591-3) 342 2120

 ventasdmb@dolphinmedical.com

 www.dolphinmedical.com

CHILE

 Callao 2970 Of. 806
Las Condes - Santiago - Chile


 (56 2) 2952 0165

 ventas@dolphinmedical.com

 www.dolphinmedical.com

COLOMBIA

 Cra 67 No 167-61 Of 607
Bogotá - Colombia

 (57 1) 31 3412 3620

 ventasdmc@dolphinmedical.com

 www.dolphinmedical.com

PERÚ

 Arica 655 Int 404
Distrito Miraflores - Lima - Perú

 (51) 9 4027 5805

 ventasdmp@dolphinmedical.com

 www.dolphinmedical.com



Dolphin Medical

FITTING SET

100% SILICONA QUIRÚRGICA

Los pesarios **"Dolphin Medical"** Son dispositivos confeccionados en 100 % silicona blanca quirúrgica de alta calidad, son **libres de látex**, cuya densidad comprende entre 1,12 - 1,19 g/sqcm. Debido a su tamaño y diferentes formas, el peso de cada uno varía, no siendo un valor significativo que afecte el uso adecuado. Contamos con más de 200 modelos y tamaños. Fácil de insertar, remover y limpiar, aprobados por la **FDA**. Son útiles para prolapso, incontinencia urinaria y diagnóstico.



SET GELLHORN / Ref:FS5000



SET RING / Ref: FS1000



SET RING CON MEMBRANA / Ref:FS6000

Nuestros Set de prueba de color azul, que es indicativo que esta confeccionado de un material distinto al de color blanco con el objeto de **"Autoclavar"**, luego del uso en la paciente y usar en la siguiente, cuentan con las **seis medidas más utilizadas**, y se identifican de color **"azul"**. Permite al profesional realizar las pruebas correspondientes a cada paciente e indicar en receta, la medida seleccionada y modelo de pesario que se correlaciona con el diámetro externo de éste.



RING



PARA PROLAPSO DE 1er Y 2do GRADO



El pesario **Ring** es un dispositivo confeccionado de **100% silicona blanca quirúrgica de alta calidad, libre de látex**, cuya densidad comprende entre 1,12 - 1,19 g/sqcm.

Debido a su tamaño y diferentes formas, el peso de cada uno varía, no siendo un valor significativo que afecte el uso adecuado.


Fácil de insertar, remover y limpiar, aprobados por la FDA.



*El pesario **Ring** es un anillo redondo flexible con muesca que facilita la colocación. Ayuda a sostener la uretra y el cuello de la vejiga. La membrana entrega apoyo adicional para un cistocele.*

Indicaciones: Útil para un prolapso uterino reducido de primer y segundo grado, asociado con un cistocele menor.

Código	#	CM
R0	#0	4.45
R1	#1	5.08
R2	#2	5.72
R3	#3	6.35
R4	#4	7.00
R5	#5	7.62
R6	#6	8.25
R7	#7	8.90
R8	#8	9.52
R9	#9	10.15

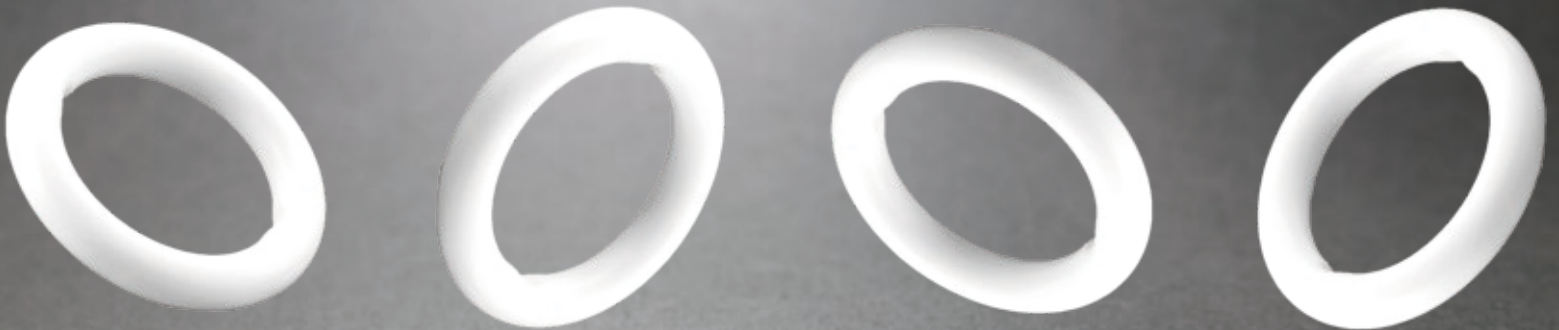



RING

CON MEMBRANA

PARA PROLAPSO DE 1er Y 2do GRADO



El pesario **Ring con membrana** es un dispositivo confeccionado de **100% silicona blanca quirúrgica de alta calidad, libre de látex**, cuya densidad comprende entre 1,12 - 1,19 g/sqcm. Debido a su tamaño y diferentes formas, el peso de cada uno varía, no siendo un valor significativo que afecte el uso adecuado. Fácil de insertar, remover y limpiar, aprobados por la FDA.



Código	#	CM
RS0	#0	4.45
RS1	#1	5.08
RS2	#2	5.72
RS3	#3	6.35
RS4	#4	7.00
RS5	#5	7.62
RS6	#6	8.25
RS7	#7	8.90
RS8	#8	9.52
RS9	#9	10.15

El **Pesario Ring con membrana** es un anillo redondo flexible con muesca que facilita la colocación. Ayuda a sostener la uretra y el cuello de la vejiga. La membrana entrega apoyo adicional para un cistocele.

Indicaciones: Útil para un prolapso uterino reducido de primer y segundo grado, asociado con un cistocele menor.



RING

CON SOPORTE



PARA INCONTINENCIA URINARIA DE ESFUERZO




El pesario **Ring con soporte** es un dispositivo confeccionado de **100% silicona blanca quirúrgica de alta calidad, libre de látex**, cuya densidad comprende entre 1,12 - 1,19 g/sqcm. Debido a su tamaño y diferentes formas, el peso de cada uno varía, no siendo un valor significativo que afecte el uso adecuado. Fácil de insertar, remover y limpiar, aprobados por la FDA.



El pesario **Ring con soporte** tiene las mismas indicaciones que el pesario RING y también puede aliviar la incontinencia urinaria de esfuerzo.

Indicaciones: Útil para un prolapso uterino reducido de primer y segundo grado, asociado con un cistocele menor.

CÓDIGO	#	CM
RK0	#0	4.45
RK1	#1	5.08
RK2	#2	5.72
RK3	#3	6.35
RK4	#4	7.00
RK5	#5	7.62
RK6	#6	8.25
RK7	#7	8.90

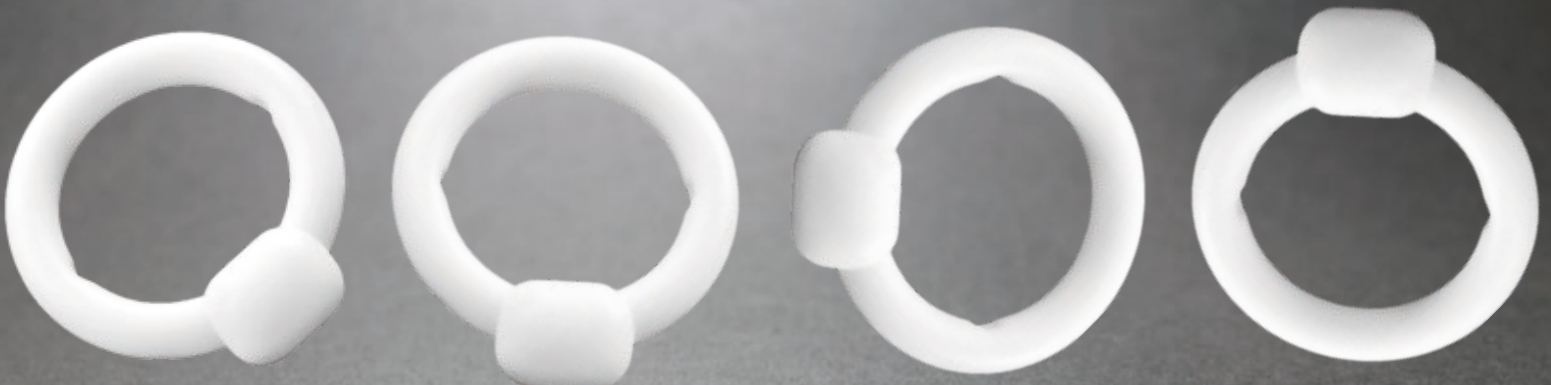



RING

CON SOPORTE Y MEMBRANA

PARA INCONTINENCIA URINARIA DE ESFUERZO



El **Pesario Ring con membrana y soporte** es un dispositivo confeccionado de **100% silicona blanca quirúrgica de alta calidad, libre de látex**, cuya densidad comprende entre 1,12 - 1,19 g/sqcm.

Debido a su tamaño y diferentes formas, el peso de cada uno varía, no siendo un valor significativo que afecte el uso adecuado.

Fácil de insertar, remover y limpiar, aprobados por la FDA.



CÓDIGO	#	CM
RKS0	#0	4.45
RKS1	#1	5.08
RKS2	#2	5.72
RKS3	#3	6.35
RKS4	#4	7.00
RKS5	#5	7.62
RKS6	#6	8.25
RKS7	#7	8.90

El pesario **Ring con membrana y soporte** tiene las mismas indicaciones que el pesario RING y también puede aliviar la incontinencia urinaria de esfuerzo.

Indicaciones: Útil para un prolapso uterino reducido de primer y segundo grado, asociado con un cistocele menor.



OVAL



PARA PROLAPSO DE 1er Y 2do GRADO



El **Pesario Oval** es un dispositivo confeccionado de **100% silicona blanca quirúrgica de alta calidad, libre de látex**, cuya densidad comprende entre 1,12 - 1,19 g/sqcm.

Debido a su tamaño y diferentes formas, el peso de cada uno varía, no siendo un valor significativo que afecte el uso adecuado.


Fácil de insertar, remover y limpiar, aprobados por la FDA.



El pesario **Oval** para mujeres con antecedentes de cirugía vaginal, ya que su forma ovalada inhibe su rotación. Es de uso común para un prolapso uterino o un cistocele.

Indicaciones: Recomendado para un prolapso de primer y segundo grado.

CÓDIGO	#	CM
OV1	#1	5.08
OV2	#2	5.72
OV3	#3	6.35
OV4	#4	7.00
OV5	#5	7.62
OV6	#6	8.25
OV7	#7	8.90
OV8	#8	9.52
OV9	#9	10.15

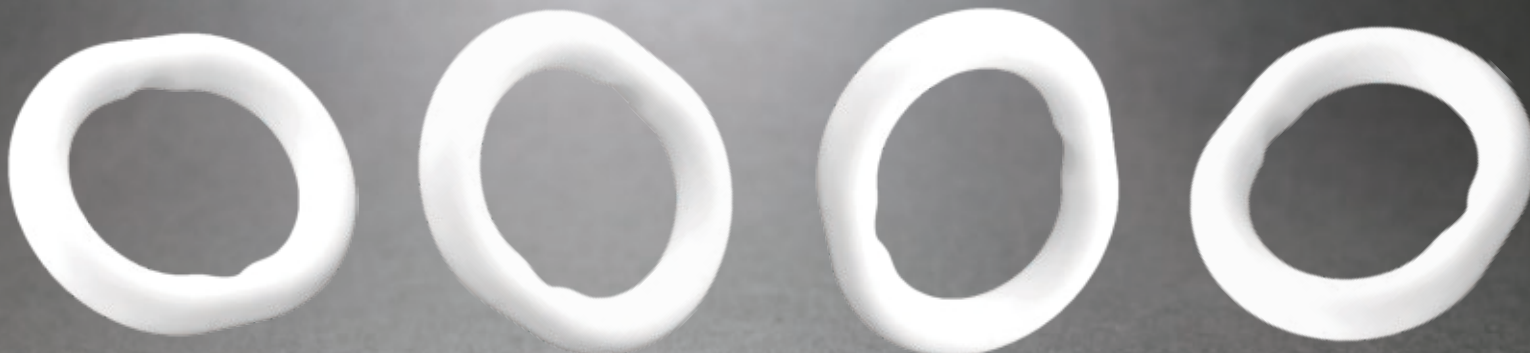



OVAL

CON MEMBRANA

PARA PROLAPSO DE 1er Y 2do GRADO



El **Pesario Oval con Membrana** es un dispositivo confeccionado de **100% silicona blanca quirúrgica de alta calidad, libre de látex**, cuya densidad comprende entre 1,12 - 1,19 g/sqcm. Debido a su tamaño y diferentes formas, el peso de cada uno varía, no siendo un valor significativo que afecte el uso adecuado. Fácil de insertar, remover y limpiar, aprobados por la FDA.



CÓDIGO	#	CM
OVS1	#1	5.08
OVS2	#2	5.72
OVS3	#3	6.35
OVS4	#4	7.00
OVS5	#5	7.62
OVS6	#6	8.25
OVS7	#7	8.90
OVS8	#8	9.52
OVS9	#9	10.15

*Pesario **Oval con Membrana** para mujeres con antecedentes de cirugía vaginal, ya que su forma ovalada inhibe su rotación. Es de uso común para un prolapso uterino o un cistocele.*

Indicaciones: *Recomendado para un prolapso de primer y segundo grado.*



SHAATZ



PARA PROLAPSO DE 2do Y 3er GRADO



El pesario **Shaatz** es un dispositivo confeccionado de **100% silicona blanca quirúrgica de alta calidad, libre de látex**, cuya densidad comprende entre 1,12 - 1,19 g/sqcm.

Debido a su tamaño y diferentes formas, el peso de cada uno varía, no siendo un valor significativo que afecte el uso adecuado.

Fácil de insertar, remover y limpiar, aprobados por la FDA.



El pesario **Shaatz** tiene una forma circular con orificios para el drenaje de secreciones, puede aliviar los síntomas de un cistocele. Su forma convexa asegura un ajuste perfecto mientras que los orificios de drenaje permiten una fácil extracción.

Indicaciones: Útil para un prolapso uterino de segundo o tercer grado.

CÓDIGO	#	CM
SH0	#0	3.81
SH1	#1	4.45
SH2	#2	5.08
SH3	#3	5.72
SH4	#4	6.35
SH5	#5	7.00
SH6	#6	7.62
SH7	#7	8.25
SH8	#8	8.90



GELLHORN

CON VÁSTAGO LARGO



PARA PROLAPSO DE 2do Y 3er GRADO

El pesario **Gellhorn con vástago largo** es un dispositivo confeccionado de **100% silicona blanca quirúrgica de alta calidad, libre de látex**, cuya densidad comprende entre 1,12 - 1,19 g/sqcm.

Debido a su tamaño y diferentes formas, el peso de cada uno varía, no siendo un valor significativo que afecte el uso adecuado.

Fácil de insertar, remover y limpiar, aprobados por la FDA.



El pesario **Gellhorn con vástago largo con drenajes** se usa para aliviar los síntomas de cistocele o rectocele. El vástago de este pesario se pliega fácilmente para facilitar la inserción y la extracción. Se ajusta superior y anteriormente. Entrega menos apoyo para rectoceles ya que hay menos apoyo en el segmento posterior.

Indicaciones: Útil para un prolapso uterino de segundo o tercer grado, también es útil en incontinencia.

CÓDIGO	#	CM
GD0	#0	3.80
GD1	#1	4.45
GD2	#2	5.08
GD3	#3	5.72
GD4	#4	6.35
GD5	#5	7.00
GD6	#6	7.62
GD7	#7	8.25
GD8	#8	8.90





GELLHORN

CON VÁSTAGO CORTO

PARA PROLAPSO DE 2do Y 3er GRADO



El pesario **Gellhorn con vástago corto** es un dispositivo confeccionado de **100% silicona blanca quirúrgica de alta calidad, libre de látex**, cuya densidad comprende entre 1,12 - 1,19 g/sqcm.

Debido a su tamaño y diferentes formas, el peso de cada uno varía, no siendo un valor significativo que afecte el uso adecuado.

Fácil de insertar, remover y limpiar, aprobados por la FDA.



CÓDIGO	#	CM
GS0	#0	3.80
GS1	#1	4.45
GS2	#2	5.08
GS3	#3	5.72
GS4	#4	6.35
GS5	#5	7.00
GS6	#6	7.62
GS7	#7	8.25
GS8	#8	8.90

El pesario **Gellhorn con vástago corto con drenajes** se usa para aliviar los síntomas de cistocele o rectocele. El vástago de este pesario se pliega fácilmente para facilitar la inserción y la extracción. Se ajusta superior y anteriormente. Entrega menos apoyo para rectoceles ya que hay menos apoyo en el segmento posterior.

Indicaciones: Útil para un prolapso uterino de segundo o tercer grado, también es útil en incontinencia.



DISH



PARA PROLAPSO DE 1er Y 2do GRADO



El pesario **Dish** es un dispositivo confeccionado de **100% silicona blanca quirúrgica de alta calidad, libre de látex**, cuya densidad comprende entre 1,12 - 1,19 g/sqcm.

Debido a su tamaño y diferentes formas, el peso de cada uno varía, no siendo un valor significativo que afecte el uso adecuado.

Fácil de insertar, remover y limpiar, aprobados por la FDA.



Pesario **Dish** en forma de plato con orificios para permitir el drenaje, se utiliza para aliviar el estrés de un prolapso uterino, un cistocele o un rectocele.

Indicaciones: Útil para un prolapso uterino de segundo o tercer grado, también es útil para aliviar la incontinencia urinaria de esfuerzo.

CÓDIGO	#	CM
DSH0	#0	5.00
DSH1	#1	5.50
DSH2	#2	6.00
DSH3	#3	6.50
DSH4	#4	7.00
DSH5	#5	7.50
DSH6	#6	8.00
DSH7	#7	8.50





DISH

CON MEMBRANA

PARA PROLAPSO DE 1er Y 2do GRADO




El pesario **Dish con Membrana** es un dispositivo confeccionado de **100% silicona blanca quirúrgica de alta calidad, libre de látex**, cuya densidad comprende entre 1,12 - 1,19 g/sqcm. Debido a su tamaño y diferentes formas, el peso de cada uno varia, no siendo un valor significativo que afecte el uso adecuado. Fácil de insertar, remover y limpiar, aprobados por la FDA.



CÓDIGO	#	CM
DSHS0	#0	5.00
DSHS1	#1	5.50
DSHS2	#2	6.00
DSHS3	#3	6.50
DSHS4	#4	7.00
DSHS5	#5	7.50
DSHS6	#6	8.00
DSHS7	#7	8.50

Pesario **Dish con membrana** en forma de plato con orificios para permitir el drenaje, la membrana flexible del plato apoya y eleva un cistocele reducido.

Indicaciones: Útil para un prolapso uterino de segundo o tercer grado, también es útil para aliviar la incontinencia urinaria de esfuerzo.

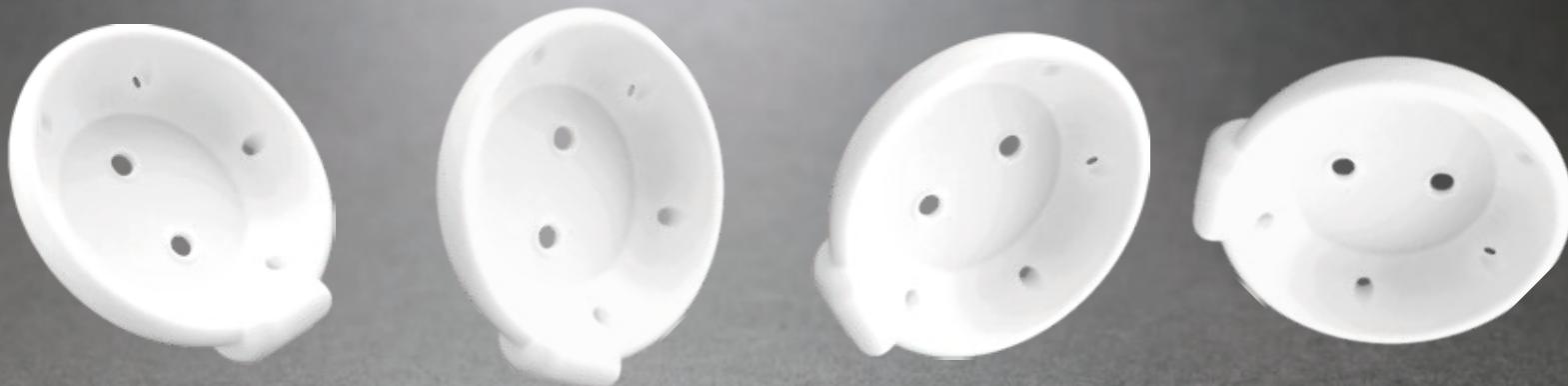

CUP




PARA PROLAPSO DE 2do Y 3er GRADO

El pesario **Cup** es un dispositivo confeccionado de **100% silicona blanca quirúrgica de alta calidad, libre de látex**, cuya densidad comprende entre 1,12 - 1,19 g/sqcm.

Debido a su tamaño y diferentes formas, el peso de cada uno varía, no siendo un valor significativo que afecte el uso adecuado.


Fácil de insertar, remover y limpiar, aprobados por la FDA.

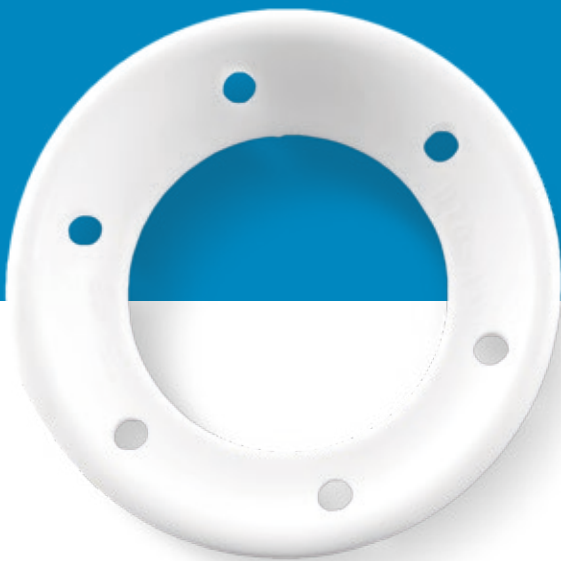

El pesario **Cup**, en forma de plato con orificios para permitir el drenaje.

Indicaciones: Se utiliza para un prolapso uterino de primer o segundo grado leve.

CÓDIGO	#	CM
CP0	#0	5.00
CP1	#1	5.50
CP2	#2	6.00
CP3	#3	6.50
CP4	#4	7.00
CP5	#5	7.50
CP6	#6	8.00
CP7	#7	8.50

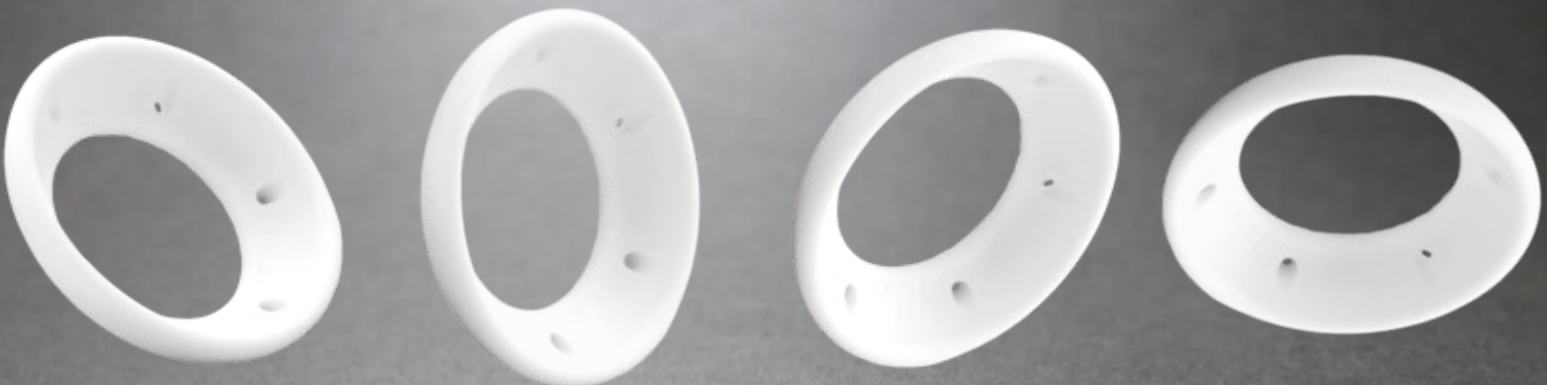

MARLAND



PARA PROLAPSO DE 2do Y 3er GRADO



El pesario **Marland** es un dispositivo confeccionado de **100% silicona blanca quirúrgica de alta calidad, libre de látex**, cuya densidad comprende entre 1,12 - 1,19 g/sqcm. Debido a su tamaño y diferentes formas, el peso de cada uno varía, no siendo un valor significativo que afecte el uso adecuado. Fácil de insertar, remover y limpiar, aprobados por la FDA.



El pesario **Marland** es un disco suave y redondo con apoyo flexible para la uretra, efectivo en el control de la incontinencia por estrés.

Indicaciones: Se usa para aliviar los síntomas de un prolapso uterino de segundo o tercer grado, un cistocele o un rectocele. La plataforma elevada de este pesario también puede aliviar la incontinencia urinaria de esfuerzo.

CÓDIGO	#	CM
M2	#2	5.72
M3	#3	6.35
M4	#4	7.00
M5	#5	7.62
M6	#6	8.25
M7	#7	8.90
M8	#8	9.52



MARLAND

CON MEMBRANA



PARA PROLAPSO DE 2do Y 3er GRADO



El pesario **Marland con membrana** es un dispositivo confeccionado de **100% silicona blanca quirúrgica de alta calidad, libre de látex**, cuya densidad comprende entre 1,12 - 1,19 g/sqcm.

Debido a su tamaño y diferentes formas, el peso de cada uno varía, no siendo un valor significativo que afecte el uso adecuado.

Fácil de insertar, remover y limpiar, aprobados por la FDA.




El pesario **Marland con membrana** es un disco suave y redondo con apoyo flexible para la uretra, efectivo en el control de la incontinencia por estrés.

Indicaciones: Se usa para aliviar los síntomas de un prolapso uterino de segundo o tercer grado, un cistocele o un rectocele. La plataforma elevada de este pesario también puede aliviar la incontinencia urinaria de esfuerzo.

CÓDIGO	#	CM
MS2	#2	5.72
MS3	#3	6.35
MS4	#4	7.00
MS5	#5	7.62
MS6	#6	8.25
MS7	#7	8.90
MS8	#8	9.52



HODGE

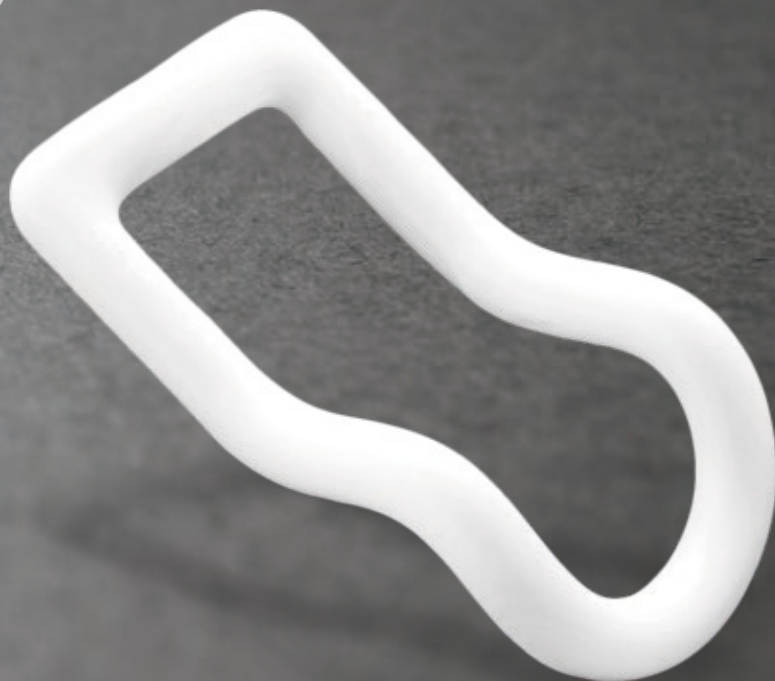

PARA PROLAPSO DE 1er Y 2do GRADO




El **Pesario Hodge** es un dispositivo confeccionado de **100% silicona blanca quirúrgica de alta calidad, libre de látex**, cuya densidad comprende entre 1,12 - 1,19 g/sqcm. Debido a su tamaño y diferentes formas, el peso de cada uno varía, no siendo un valor significativo que afecte el uso adecuado. Fácil de insertar, remover y limpiar, aprobados por la FDA.



*El pesario maleable **Hodge**, fue diseñado para ser moldeado manualmente para el ajuste individual, generalmente se prescriben para mujeres en edad reproductiva que prefieren una terapia conservadora.*


Indicaciones: *Se usa comúnmente para un prolapso uterino de primer grado o segundo grado leve y también puede aliviar un cistocele.*

CÓDIGO	#	CM
HD0	#0	6.50
HD1	#1	7.00
HD2	#2	7.50
HD3	#3	8.00
HD4	#4	8.50
HD5	#5	9.00
HD6	#6	9.50
HD7	#7	10.00
HD8	#8	10.50
HD9	#9	11.00

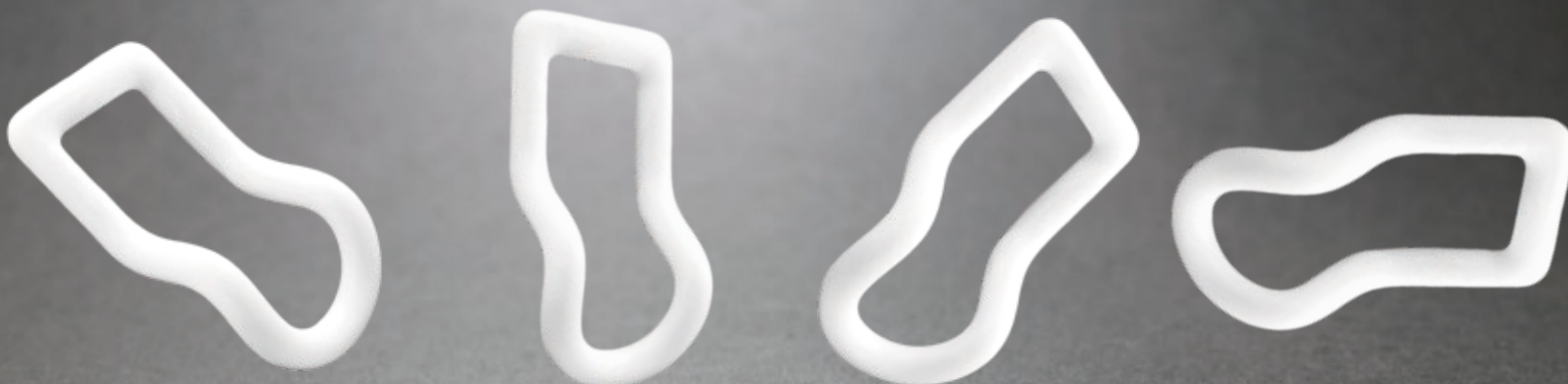

HODGE

CON MEMBRANA

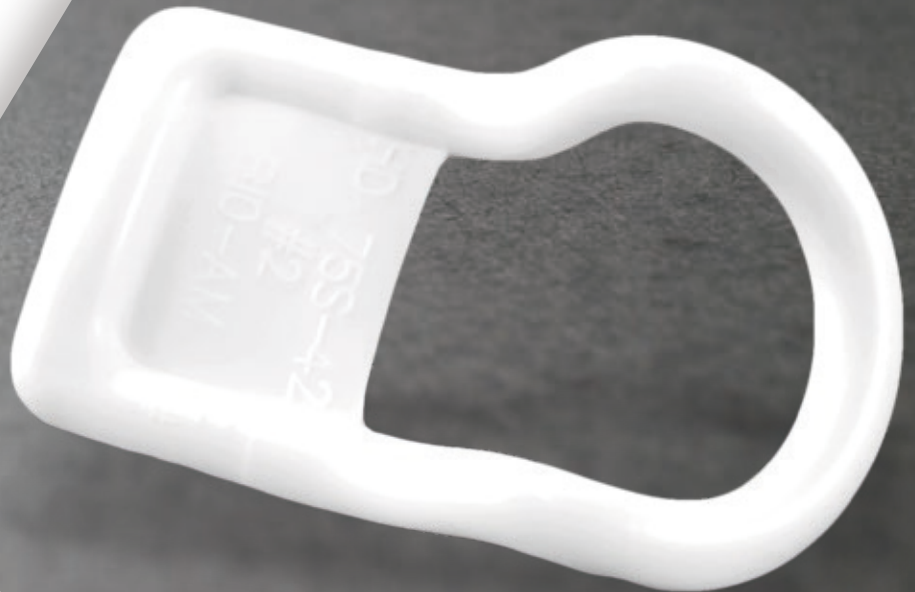

PARA PROLAPSO DE 1er Y 2do GRADO

El pesario **Hodge con membrana** es un dispositivo confeccionado de **100% silicona blanca quirúrgica de alta calidad, libre de látex**, cuya densidad comprende entre 1,12 - 1,19 g/sqcm.

Debido a su tamaño y diferentes formas, el peso de cada uno varía, no siendo un valor significativo que afecte el uso adecuado.

Fácil de insertar, remover y limpiar, aprobados por la FDA.



El pesario maleable **Hodge con membrana**, fue diseñado para ser moldeado manualmente para el ajuste individual, generalmente se prescriben para mujeres en edad reproductiva que prefieren una terapia conservadora.

Indicaciones: Se usa comúnmente para un prolapso uterino de primer grado o segundo grado leve y también puede aliviar un cistocele.

CÓDIGO	#	CM
HDS0	#0	6.50
HDS1	#1	7.00
HDS2	#2	7.50
HDS3	#3	8.00
HDS4	#4	8.50
HDS5	#5	9.00
HDS6	#6	9.50
HDS7	#7	10.00
HDS8	#8	10.50
HDS9	#9	11.00



GEHRUNG



PARA PROLAPSO DE 2do Y 3er GRADO



El pesario **Gehrung** es un dispositivo confeccionado de **100% silicona blanca quirúrgica de alta calidad, libre de látex**, cuya densidad comprende entre 1,12 - 1,19 g/sqcm. Debido a su tamaño y diferentes formas, el peso de cada uno varía, no siendo un valor significativo que afecte el uso adecuado. Fácil de insertar, remover y limpiar, aprobados por la FDA.



*Pesario **Gehrung** sus brazos o alas se apoyan en la pared vaginal posterior. Evita la presión en el recto mientras apoya la pared anterior. Su forma de arco maleable puede ser deformada para ajustarse a la forma de la vagina.*

Indicaciones: Útil para un cistocele o rectocele, siendo también de utilidad para aliviar un prolapso uterino. Recomendado para prolapso de segundo o tercer grado.

CÓDIGO	#	CM
GH0	#0	5.00
GH1	#1	5.50
GH2	#2	6.00
GH3	#3	6.50
GH4	#4	7.00
GH5	#5	7.50
GH6	#6	8.00
GH7	#7	8.50
GH8	#8	9.00
GH9	#9	9.50



DONUT



PARA PROLAPSO DE 2do Y 3er GRADO

El pesario **Donut** es un dispositivo confeccionado de **100% silicona blanca quirúrgica de alta calidad, libre de látex**, cuya densidad comprende entre 1,12 - 1,19 g/sqcm.

Debido a su tamaño y diferentes formas, el peso de cada uno varía, no siendo un valor significativo que afecte el uso adecuado.

Fácil de insertar, remover y limpiar, aprobados por la FDA.



Silicona suave con forma de "Dona". Cierra la vagina superior y apoya un prolapso uterino.

Indicaciones: Útil para *cistocelos* o *rectocelos*. Indicado para prolapso de la vagina luego de una *histerectomía*.

Es necesaria una adecuada integración de la entrada para que el pesario se mantenga en su lugar.

CÓDIGO	#	CM
D0	#0	5.08
D1	#1	5.72
D2	#2	6.35
D3	#3	7.00
D4	#4	7.62
D5	#5	8.25
D6	#6	8.90
D7	#7	9.52





CUBO

PARA PROLAPSO DE 3er GRADO

El pesario **Cubo** es un dispositivo confeccionado de **100% silicona blanca quirúrgica de alta calidad, libre de látex**, cuya densidad comprende entre 1,12 - 1,19 g/sqcm.

Debido a su tamaño y diferentes formas, el peso de cada uno varía, no siendo un valor significativo que afecte el uso adecuado.

Fácil de insertar, remover y limpiar, aprobados por la FDA.



CÓDIGO	#	CM
CU0	#0	2.50
CU1	#1	2.90
CU2	#2	3.30
CU3	#3	3.70
CU4	#4	4.10
CU5	#5	4.50
CU6	#6	5.00
CU7	#7	5.60
CU8	#8	6.30
CU9	#9	7.00
CU91	#10	7.50

Silicona suave con forma de "Cubo".

Indicado para prolapso de la pared vaginal ya que evita que la pared colapse gracias a sus seis puntos de apoyo. Puede ser usado por una atleta y removido luego del ejercicio. La mucosa se moldea en las cavidades creando una presión negativa.

Indicaciones: *Útil para prolapso de 3er grado, cistocele, rectocele con o sin tono vaginal adecuado. Frecuentemente es la única opción de apoyo satisfactoria para mujeres con un prolapso completo.*



CUBO

CON DRENAJE



PARA PROLAPSO DE 3er GRADO



El pesario **Cubo** es un dispositivo confeccionado de **100% silicona blanca quirúrgica de alta calidad, libre de látex**, cuya densidad comprende entre 1,12 - 1,19 g/sqcm.

Debido a su tamaño y diferentes formas, el peso de cada uno varía, no siendo un valor significativo que afecte el uso adecuado.


Fácil de insertar, remover y limpiar, aprobados por la FDA.

Silicona suave con forma de "Cubo", además posee orificios para el drenaje de las secreciones.

Indicado para prolapso de la pared vaginal ya que evita que la pared colapse gracias a sus seis puntos de apoyo. Puede ser usado por una atleta y removido luego del ejercicio. La mucosa se moldea en las cavidades creando una presión negativa.

Indicaciones: Útil para prolapso de 3er grado, cistocele, rectocele con o sin tono vaginal adecuado. Frecuentemente es la única opción de apoyo satisfactoria para mujeres con un prolapso completo.

CÓDIGO	#	CM
CUD0	#0	2.50
CUD1	#1	2.90
CUD2	#2	3.30
CUD3	#3	3.70
CUD4	#4	4.10
CUD5	#5	4.50
CUD6	#6	5.00
CUD7	#7	5.60
CUD8	#8	6.30
CUD9	#9	7.00
CUD91	#10	7.50

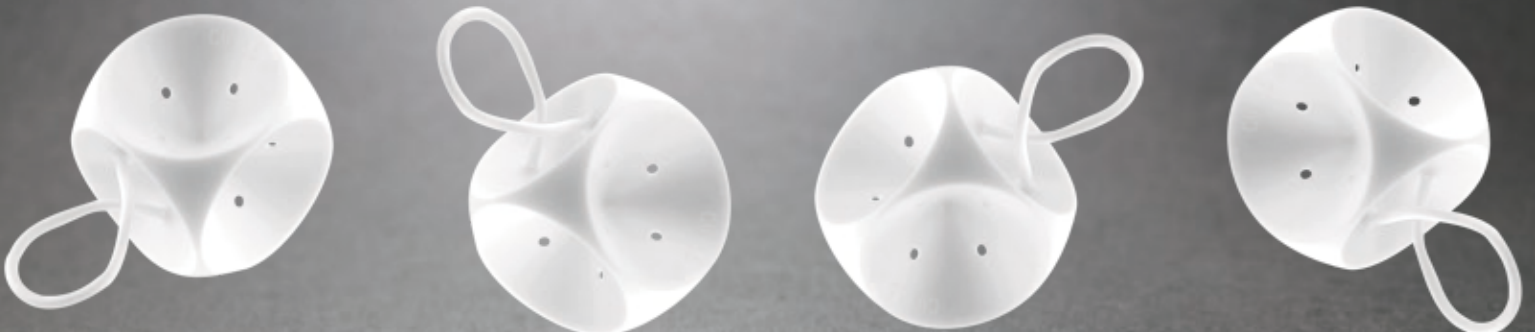



Dolphin Medical




Ginecología



Laparoscopia



Endoscopia

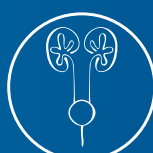

Urología



Cirugía Plástica



Dermatología

www.dolphinmedical.com