



este producto no fue  
hecho con látex de  
caucho natural

# ELECTRODOS ASA **DOLPHIN**



## LLETZ / LEEP

**Electrodos Dolphin** para realizar procedimientos de electrocoagulación, manejo de la patología cervical neoplásica preinvasora, con la técnica de escisión con asa diatérmica.

**LLETZ;** *Large Loop Excision of the Transformation Zone*  
**LEEP;** *Loop electrosurgical Excision Procedure*

**Indicaciones:**

- Conización electroquirúrgica del cuello del útero para lesiones neoplásicas intraepiteliales (NIE)

**Contraindicaciones:**


- Embarazo
- Pacientes con cáncer invasor visible a la examinación

**Características Técnicas:**


- Alambre de tungsteno de 0,5mm
- Largo 13cm
- Conector universal cónico, para ser usado con cualquier marca de lápiz, conexión Standard 3/32" (2,4mm)
- Para ser usado con potencia de salida de 35 a 50 Watts, dependiendo del tamaño del Asa
- Desechables
- Base reforzada
- Este producto no fue hecho con latex de caucho natural

**Tipos de Electrodos:**


- Loop
- Rectangular
- Triangular
- Bola

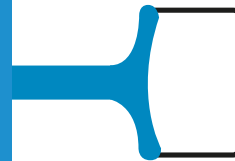

RECTANGULAR / CUADRADO

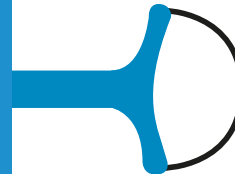

LOOP

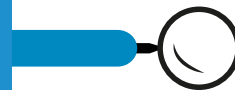

BOLA



TRIANGULAR



## TIPOS DE ELECTRODOS



### Electrodo coagulación Bola 13cm

| Código    | Descripción Producto | Medida | Presentación       |
|-----------|----------------------|--------|--------------------|
| DMB000003 | ELECTRODO BOLA       | 3 mm   | Caja x 10 unidades |
| DMB000005 | ELECTRODO BOLA       | 5 mm   | Caja x 10 unidades |



### Electrodo Asa Loop® 13cm

| Código    | Descripción Producto | Medida     | Presentación       |
|-----------|----------------------|------------|--------------------|
| DML000505 | ELECTRODO ASA LOOP®  | 5 x 5 mm   | Caja x 10 unidades |
| DML001005 | ELECTRODO ASA LOOP®  | 10 x 5 mm  | Caja x 10 unidades |
| DML001008 | ELECTRODO ASA LOOP®  | 10 x 8 mm  | Caja x 10 unidades |
| DML001010 | ELECTRODO ASA LOOP®  | 10 x 10 mm | Caja x 10 unidades |
| DML001508 | ELECTRODO ASA LOOP®  | 15 x 8 mm  | Caja x 10 unidades |
| DML001510 | ELECTRODO ASA LOOP®  | 15 x 10 mm | Caja x 10 unidades |
| DML001512 | ELECTRODO ASA LOOP®  | 15 x 12 mm | Caja x 10 unidades |
| DML001515 | ELECTRODO ASA LOOP®  | 15 x 15 mm | Caja x 10 unidades |
| DML002008 | ELECTRODO ASA LOOP®  | 20 x 8 mm  | Caja x 10 unidades |
| DML002010 | ELECTRODO ASA LOOP®  | 20 x 10 mm | Caja x 10 unidades |
| DML002012 | ELECTRODO ASA LOOP®  | 20 x 12 mm | Caja x 10 unidades |
| DML002015 | ELECTRODO ASA LOOP®  | 20 x 15 mm | Caja x 10 unidades |
| DML002020 | ELECTRODO ASA LOOP®  | 20 x 20 mm | Caja x 10 unidades |
| DML002510 | ELECTRODO ASA LOOP®  | 25 x 10 mm | Caja x 10 unidades |
| DML002515 | ELECTRODO ASA LOOP®  | 25 x 15 mm | Caja x 10 unidades |
| DML002520 | ELECTRODO ASA LOOP®  | 25 x 20 mm | Caja x 10 unidades |



### Electrodo Triangular 13cm

| Código   | Descripción Producto                      | Medida     | Presentación       |
|----------|---|------------|--------------------|
| DMF00050 | ELECTRODO TRIANGULAR DOLPHIN SMALL        | 18 x 10 mm | Caja x 10 unidades |
| DMF00100 | ELECTRODO TRIANGULAR DOLPHIN MEDIUM       | 15 x 12 mm | Caja x 10 unidades |
| DMF00200 | ELECTRODO TRIANGULAR DOLPHIN LARGE        | 18 x 15 mm | Caja x 10 unidades |
| DMF00300 | ELECTRODO TRIANGULAR DOLPHIN MEDIUM/LARGE | 20 x 12 mm | Caja x 10 unidades |




### Electrodo Rectangular / Cuadrado 13cm

| Código    | Descripción Producto      | Medida     | Presentación       |
|-----------|---------------------------|------------|--------------------|
| DMS001005 | ELECTRODO ASA RECTANGULAR | 10 x 5 mm  | Caja x 10 unidades |
| DMS001008 | ELECTRODO ASA RECTANGULAR | 10 x 8 mm  | Caja x 10 unidades |
| DMS001010 | ELECTRODO ASA CUADRADO    | 10 x 10 mm | Caja x 10 unidades |



## ACCESORIOS

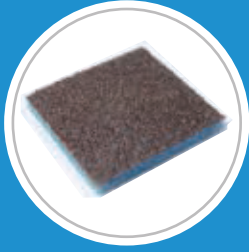

### Lija limpiadora de puntas electroquirúrgicas

| Código    | Descripción Producto                              | Medida    | Presentación       |
|-----------|---|-----------|--------------------|
| DMLQ05060 | LIIJA LIMPIADORA PUNTAS ELECTROQUIRURGICA ESTÉRIL | 5 x 6 cms | Caja x 50 unidades |




### Stingray Placa Paciente

| Código    | Descripción Producto              | TIPO      | Presentación       |
|-----------|-----------------------------------|-----------|--------------------|
| DMP000100 | Stingray Placa paciente sin cable | Monopolar | Caja x 25 unidades |



#### BOLIVIA


 Clotilde Velasco 4760  
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia


 (591-3) 342 2120

 [ventasdmb@dolphinmedical.com](mailto:ventasdmb@dolphinmedical.com)

 [www.dolphinmedical.com](http://www.dolphinmedical.com)

#### CHILE

 Callao 2970 Of. 806  
Las Condes - Santiago - Chile

 (56 2) 2952 0165

 [ventas@dolphinmedical.com](mailto:ventas@dolphinmedical.com)

 [www.dolphinmedical.com](http://www.dolphinmedical.com)

#### COLOMBIA

 Cra 67 No 167-61 Of 607  
Bogotá - Colombia


 (57 1) 31 3412 3620

 [ventasdmc@dolphinmedical.com](mailto:ventasdmc@dolphinmedical.com)

 [www.dolphinmedical.com](http://www.dolphinmedical.com)

#### PERÚ

 Arica 655 Int 404  
Distrito Miraflores - Lima - Perú

 (51) 9 4027 5805

 [ventasdmp@dolphinmedical.com](mailto:ventasdmp@dolphinmedical.com)

 [www.dolphinmedical.com](http://www.dolphinmedical.com)



Dolphin Medical

BGININ-28092020-REV-002